



Sicherheitsgurt Montage- und Gebrauchsanleitung

SICHERHEITSGURT

Der Sicherheitsgurt verschafft Ihnen ein sichereres Fahrgefühl und verhindert ein Herunterfallen vom Sitz.

BAUTEILE

- 1 Gurtstecker
- 1 Gurtbuchse
- 1 Linkes L-Blech
- 1 Rechtes L-Blech
- 2 Verbindungs-Schrauben
- 2 Verbindungs-Muttern
- 4 Untere Schrauben
- 4 Untere Beilagscheiben



MONTAGE (Von Ihrem Fachhändler durchzuführen)

1. Schrauben Sie sowohl die rechten als auch die linken L-Bleche an den hierfür vorgesehenen Punkten an die Unterseite Ihrer Sitzbank (Abb. 1).
2. Schrauben Sie Stecker und Buchse des Sicherheitsgurts an die L-Bleche (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

BENUTZUNG

1. Setzen Sie sich auf den Sitz.
2. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt am Stecker heraus und führen Sie ihn um Ihren Leib (Abb. 3).
3. Stecken Sie den Gurtstecker in die Gurtbuchse bis Sie das typische „Klick“-Geräusch hören. Der Gurtstecker ist nun sicher eingerastet (Abb. 4).
4. Um den Gurt zu lösen drücken Sie auf die rote Drucktaste an der Buchse, während Sie gleichzeitig den Gurtstecker festhalten, damit dieser nicht zurück schnellt (Abb. 5 und 6).
5. Der Gurt wird sich automatisch einrollen in seine Ausgangsstellung.



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Warnung!

Dieses Elektromobil darf keinesfalls als Sitzgelegenheit verwendet werden, während es in oder auf einem anderen Fahrzeug oder Anhänger transportiert wird. Dies gilt unabhängig von der Benutzung (oder Nicht-Benutzung) des Sicherheitsgurts.

Ihr Fachhändler:

Kaufdatum: / /

Notwendig für Garantie

HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER

Die Garantie deckt sämtliche Produktmängel ab, die nachweisbar auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate nach Erhalt der Versandbereitschaft, spätestens nach der Lieferung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch normalen Verschleiß und Abnutzung, absichtlich, nachlässig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Gebrauch verursacht wurden. Für die Verwendung unangemessener Pflegeprodukte, Schmieröle und Fette wird keine Garantie übernommen.

 **minniemobil**

Minniemobil GmbH
Grünwalder Weg 28c
82041 Oberhaching
Phone: +49 89 651089 22
Info@minniemobil.com
www.minniemobil.com
Germany